




Notice d'instructions

**ATTENTION** : Débrancher la prise de courant pour votre sécurité.


Placer le lit en position intermédiaire pour faciliter l'accès. Placer une calle entre la traverse et le lit afin de le surélever.

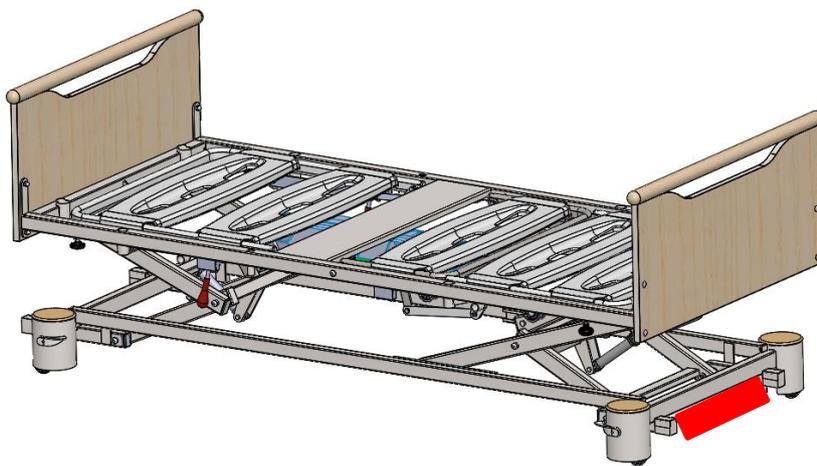


Retirer le bouchon bois supérieur avec un tournevis plat.

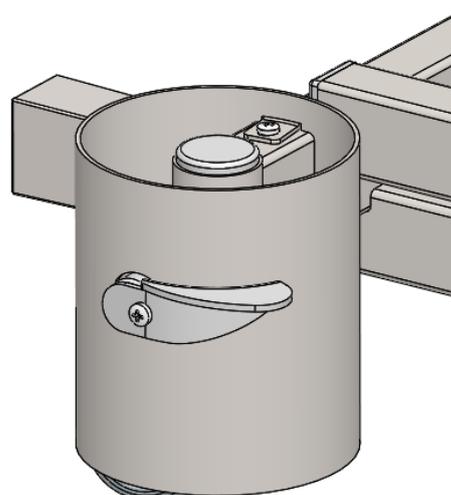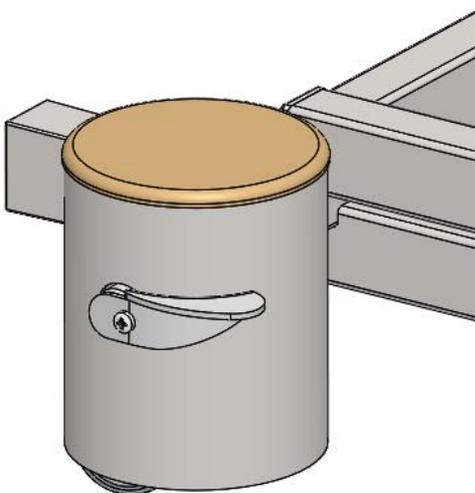


Deviser la vis en extrémité de pédale. Retirer ensuite la pédale. Cette manipulation est difficile. Forcer avec un manche en bois sur l'enjoliver.

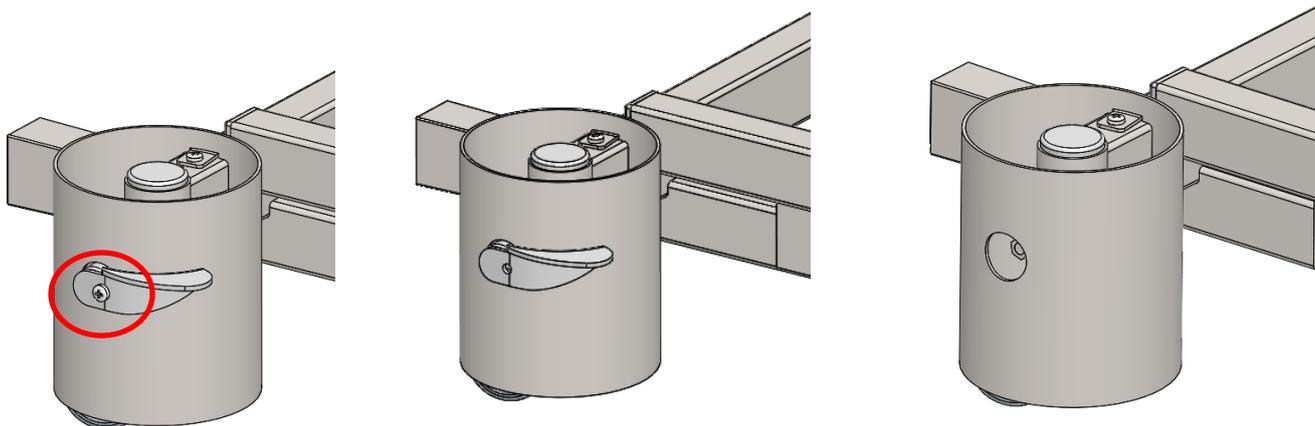

Deviser le vis de fixation de l'enjoliver pour le retirer.

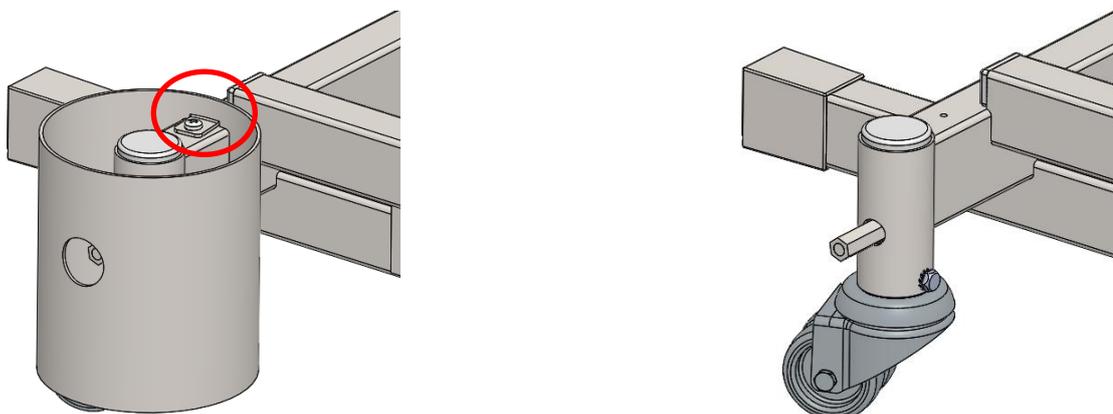

Retirer le 6 pan et deviser la vis de la roulette.

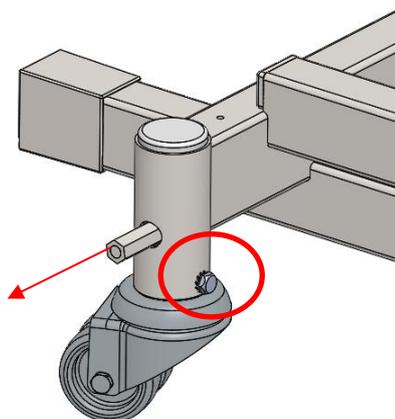

Vous pouvez ensuite retirer la roulette et la remplacer.

Viser la vis et mettre l'embout plastique si celui-là n'était pas présent.

